

Endoform® Naturalna Matryca Skóry - instrukcja nakładania (w przypadku rany niezainfekowanej)



1: Rana przed oczyszczeniem



2: Oczyszczenie rany (debridement)



3: Rana przygotowana do aplikacji opatrunku



4: Przytnij Endoform do odpowiedniego rozmiaru



5: Umieść Endoform w ranie



6: Endoform jest opatrunkiem wymagającym wilgotnego środowiska (np. poprzez wierzchni opatrunek hydrożelowy) W tym przypadku wilgotność jest zapewniona wysiękiem z rany.



7: Do pokrycia powierzchni rany można użyć kilka warstw Endoformu



8: Nałóż opatrunek nieprzywierający pomiędzy Endoform i opatrunek wtórny